



Guide de taille de tétérèlle

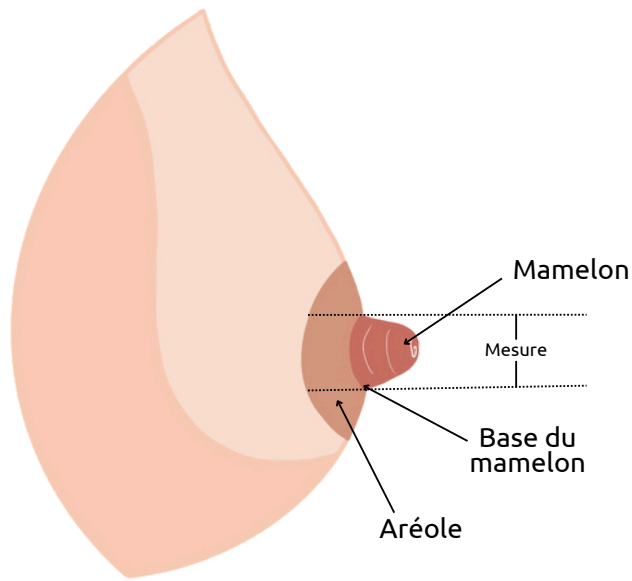

Pour une utilisation efficace du tire-lait Emy Pump, il est primordial d'utiliser la bonne taille de tétérèlle pour optimiser l'écoulement du lait et son expression.


Pour déterminer votre taille, mesurez le diamètre de la base de votre mamelon juste après une tétée ou au repos (dans ce cas, ajouter 2 mm à votre mesure).

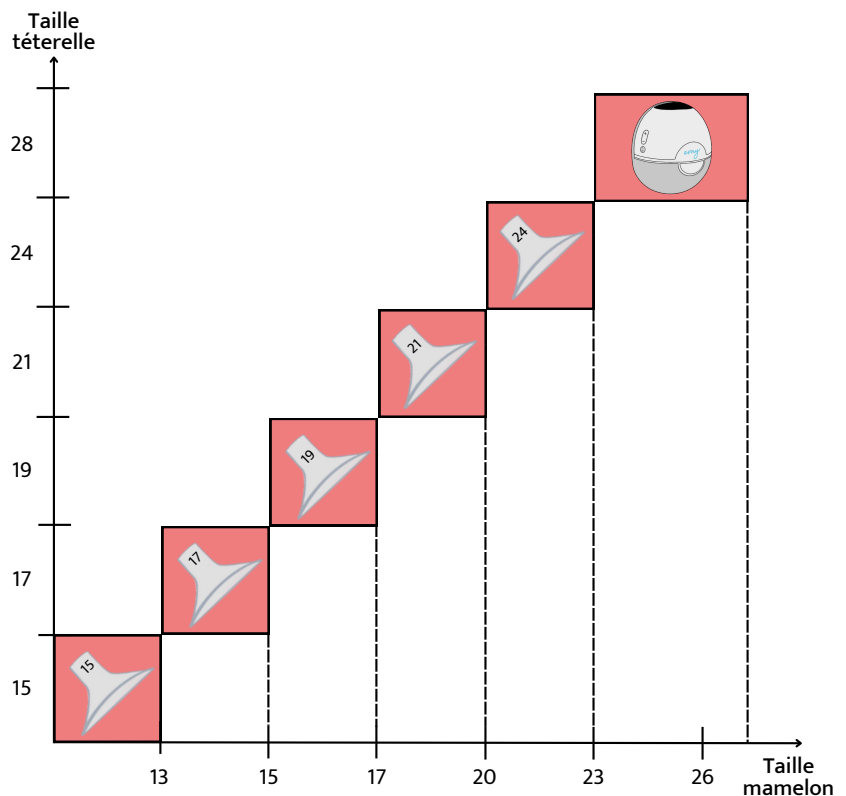

Comment savoir si la taille de tétérèlle est bien adaptée ?




Taille correcte

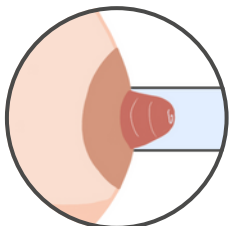

Votre mamelon est centré dans la tétérèlle et bouge librement.




Trop petite

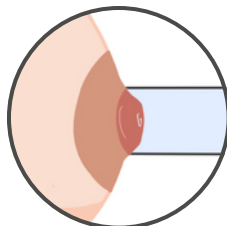

Votre mamelon frotte sur le côté de l'embout. Essayez une taille de tétérèlle plus grande.



Trop grande

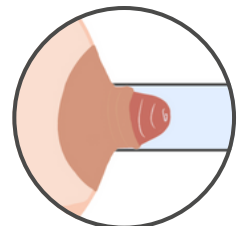

Une partie de votre aréole est aspirée dans la tétérèlle et frotte contre le bord. Essayez une taille de tétérèlle plus petite.

La taille de tétérèlle peut être différente pour chaque sein et peut aussi évoluer au cours de l'allaitement. N'hésitez pas à demander conseil à votre sage-femme ou à une consultante en lactation.